
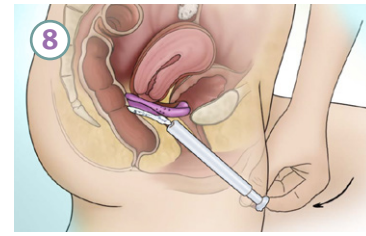


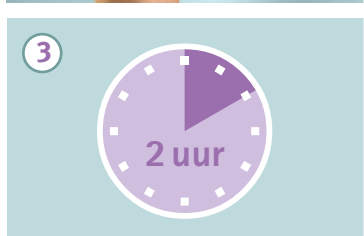
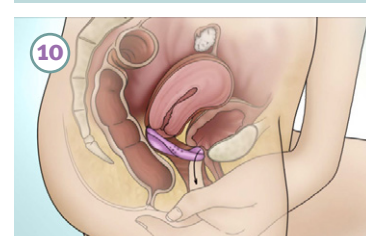
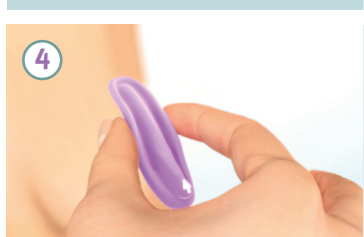

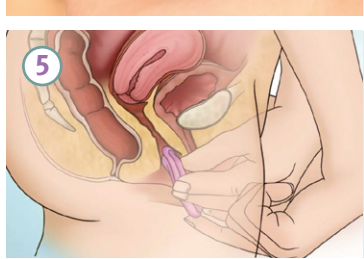

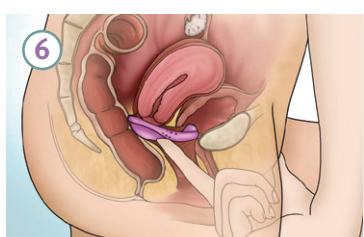

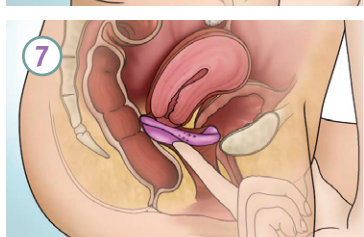



Korte gebruiksaanwijzing voor een eenvoudige en veilige toepassing

	<p>1</p> <p>Voor het inbrengen wordt het Caya diafragma bij de aangegeven gripnoppen dubbelgevouwen. In de holte die daardoor ontstaat wordt ca. 4 ml (ongeveer 1 theelepel) contraceptieve gel (Caya gel) aangebracht.</p>		<p>8</p> <p>Bij herhaalde geslachtsgemeenschap kan het diafragma in de vagina blijven zitten. Om de veiligheid te kunnen waarborgen moet voorafgaand aan de tweede coïtus extra gel met de applicator in de vagina worden aangebracht.</p>
	<p>2</p> <p>Breng een geringe hoeveelheid gel op de rand aan. Het bestrijken van de rand maakt het inbrengen in de vagina gemakkelijker.</p>		<p>9</p> <p>Het diafragma mag niet binnen 6 uur na de laatste gemeenschap uit de vagina worden verwijderd (anders kunnen beweeglijke zaadcellen zich door het dan onafgedekte cervixkanaal naar de baarmoeder verplaatsen).</p>
	<p>3</p> <p>Het Caya diafragma en de contraceptieve gel mogen maximaal 2 uur voorafgaand aan de gemeenschap worden ingebracht.</p>		<p>10</p> <p>Vervolgens wordt het Caya diafragma bij de vingergreep beetgepakt en uit de vagina getrokken.</p>
	<p>4</p> <p>Houdt het diafragma met één hand bij de gripnoppen vast. Bij het inbrengen moet de pijl in de richting van het lichaam wijzen.</p>		<p>11</p> <p>Nadat het Caya diafragma uit de vagina is verwijderd moet het met water en zeep worden gereinigd en in het open doosje worden gelegd om te drogen.</p>
	<p>5</p> <p>Het Caya diafragma wordt voorbij de baarmoedermond tot tegen de achterste vaginawand geschoven. De rand van de vingergreep moet de ruimte achter het schaambeek volledig opvullen.</p>		<p>12</p> <p>Het Caya diafragma moet altijd in het bijgeleverde doosje worden bewaard om beschadiging te voorkomen.</p>
	<p>6</p> <p>Het Caya diafragma zit op de juiste plaats indien de cervix volledig door het diafragma is bedekt en het tussen de fornix posterior en de nis van het schaambeek ligt.</p>		<p>13</p> <p>Belangrijk: het Caya diafragma mag nooit langer dan 24 uur achtereen in de vagina blijven liggen.</p>
	<p>7</p> <p>De ligging moet na het inbrengen met een vinger worden gecontroleerd. De ligging is correct wanneer door het membraan van het diafragma de baarmoedermond kan worden gevoeld (deze voelt aan als de punt van een neus). Als die niet te voelen is moet het diafragma worden verwijderd en opnieuw worden ingebracht.</p>		<p>14</p> <p>Het Caya diafragma kan gedurende 2 jaar - gerekend vanaf de eerste toepassing - worden gebruikt.</p>